

L'application My Invisalign et les soins virtuels Invisalign® Virtual Care

Connectée. Pratique. Fiable. Sûre.

Invisalign Virtual Care est une solution permettant de rester en contact à distance avec votre prestataire de service Invisalign, en route vers votre nouveau sourire. À l'aide de l'application My Invisalign, partagez des photos avec votre docteur, recevez ses commentaires et soyez assuré qu'il surveille votre traitement. Avec Virtual Care, consultez votre docteur quand vous le souhaitez et comme il vous convient.


Pour commencer



01 Télécharger l'appli My Invisalign

Une fois que votre prestataire de services vous a inscrit au programme Invisalign Virtual Care, vous recevrez un courriel d'invitation à créer votre compte. Pour commencer, suivez le lien pour télécharger ou mettre à jour votre application gratuite My Invisalign.


02 Créer votre compte de patient Invisalign :

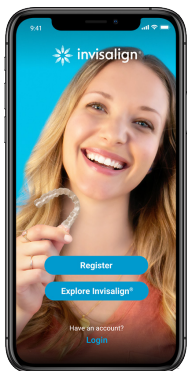


Cliquez sur « S'inscrire » (Register) et lisez les conditions d'utilisation.




Sélectionnez « oui » pour indiquer que vous êtes un patient et scannez le code QR qui se trouve sur l'emballage de vos aligneurs ou saisissez les renseignements sur le patient manuellement.

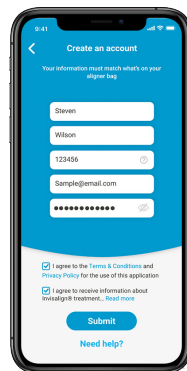

Entrez les renseignements du compte et créez votre NIP.

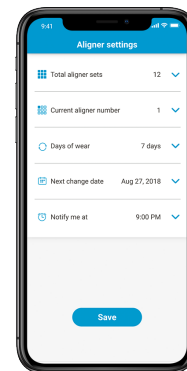

Choisissez les paramètres des aligneurs et les rappels.

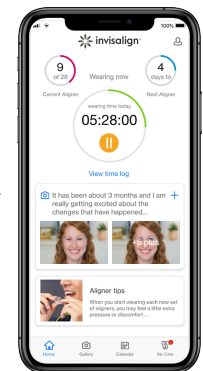


Profitez de votre compte My Invisalign et de l'application pour prendre des photos chaque fois que vous changez les aligneurs.


03 Il est préférable de permettre les notifications dans l'application My Invisalign pour ne jamais manquer les rappels sur le changement de vos aligneurs ou sur l'envoi des photos.

+ Vous avez déjà un compte My Invisalign?

Si vous avez déjà créé un compte My Invisalign, suivez les étapes ci-dessous pour l'ajout de soins virtuels Invisalign Virtual Care.

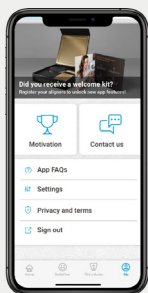


Se connecter. Touchez l'image de la trousse de bienvenue dans la section « Me ».

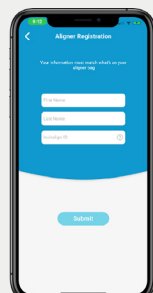

Entrez votre prénom, votre nom de famille et votre Identité Invisalign.



Scannez le code QR qui se trouve sur l'emballage de vos aligneurs ou saisissez les renseignements sur le patient manuellement.

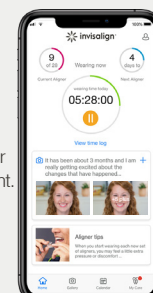


Profitez de votre compte My Invisalign et de l'application pour prendre des photos chaque fois que vous changez les aligneurs.

Votre expérience des soins virtuels d'Invisalign® Virtual Care


+ Avec chaque changement d'aligneur, vous enverrez neuf photos à votre docteur.



Vous recevrez des rappels quand viendra le moment d'envoyer des photos de progression et de passer à l'aligneur suivant.

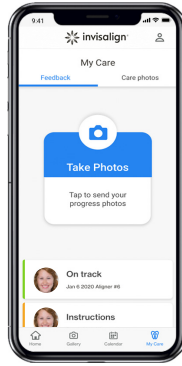

Au moment de changer vos aligneurs, amorcez le processus guidé de prise de photos dans l'application en cliquant sur l'option du menu Mes Soins au bas de la page d'accueil. Cliquez ensuite sur le message en bleu qui vous invite à prendre des photos.

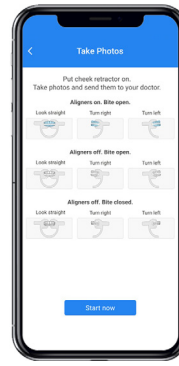

Avec l'écarteur buccal en place, vous prendrez trois photos (directement de face; le visage tourné vers la droite; le visage tourné vers la gauche) dans chaque position que voici :


- Avec les Aligneurs. Mâchoire ouverte.
- Sans les Aligneurs. Mâchoire ouverte.
- Sans les Aligneurs. Mâchoire fermée.

+ Votre docteur vous fournira un écarteur buccal pour vous aider à bien prendre de vos dents les photos claires.


Vous pouvez obtenir la pochette de soins virtuels Invisalign Virtual Care en vous adressant à votre docteur ou sur le site [InvisalignAccessories.com](https://www.invisalign.com/accessories), pour vous aider à amorcer le processus. Cette pochette comprend :

- Un écarteur buccal spécialement conçu pour vous aider à bien prendre de vos dents les photos claires dont votre docteur a besoin pour évaluer les progrès de votre traitement. Cet écarteur buccal est facile à utiliser, facile à nettoyer et ne crée pas d'inconfort.
- Une pochette de rangement pratique
- Des directives simples sur la façon de télécharger l'application My Invisalign et sur la façon d'utiliser l'écarteur buccal pour prendre des photos.

Communiquez avec votre docteur ou consultez le site [InvisalignAccessories.com](https://www.invisalign.com/accessories) pour vous renseigner.

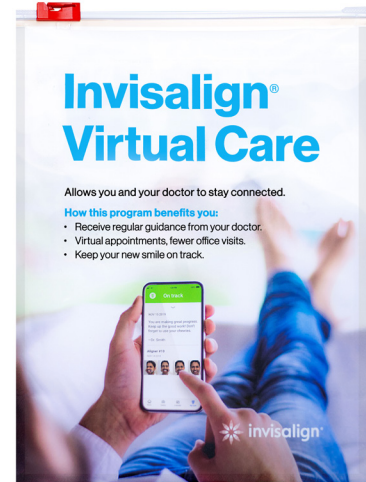

+ Insérez votre écarteur buccal et touchez chaque photo pour amorcer le processus de prise de photo.

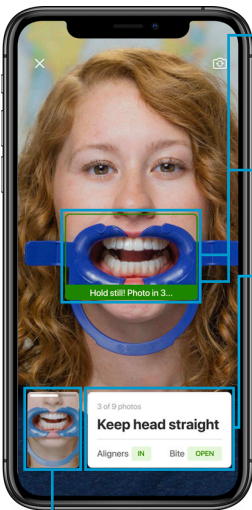


+ Cadre de la photo : Après avoir confirmé la prise d'une photo, vous devriez commencer par aligner votre bouche avec le rectangle noir au centre de l'écran.

+ Prise automatique de la photo : Une fois que tout est prêt pour la photo, le cadre de la photo tourne au vert et un compte à rebours de trois secondes est déclenché avant la prise de la photo.


+ Guide de la photo : Un champ de texte blanc s'affiche au moment de la prise de chaque photo et fournit les renseignements suivants :

- Avancement de la prise de photo : le nombre de photos déjà prises et le nombre de photos restant.
- Position de la tête pour la photo : Comment vous devez placer votre tête.
- La position de l'aligneur et la béance : déterminer si l'aligneur doit être à l'intérieur ou à l'extérieur et si la béance doit être ouverte ou fermée.

+ Guide de la vidéo : Obtenez une vidéo démontrant comment positionner la tête et l'appareil photo pour chaque photo en cliquant sur la vignette à côté du guide de la photo.

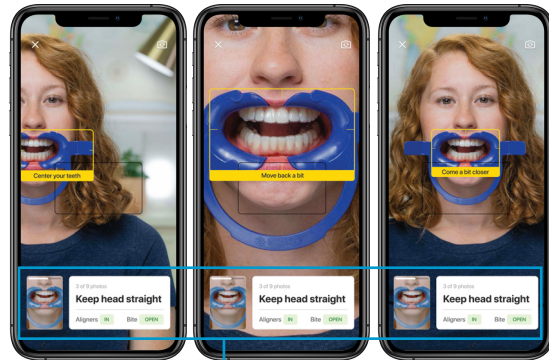

+ Processus dynamique de prise de photos : Un cadre jaune s'affiche assorti d'instructions dynamiques sur la façon d'ajuster la photo pour obtenir l'image souhaitée.

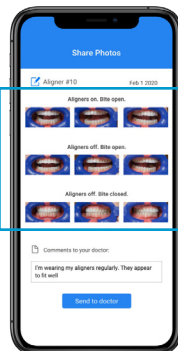


+ Envoyer des photos et des commentaires : Quand vous avez pris les neuf photos, vous pouvez ajouter des commentaires ou des questions avant de les envoyer à votre docteur.

Recevoir des commentaires

Votre docteur vous fera des commentaires, soit du type « sur la bonne voie », soit « instructions », après avoir examiné les photos que vous avez envoyées. Voir ci-dessus pour plus de détails.

+ Sur la bonne voie


Bon travail. Votre docteur a indiqué que votre nouveau sourire est sur la bonne voie et correspond à votre plan de traitement personnalisé. Continuez de porter vos aligneurs comme on vous l'a indiqué.

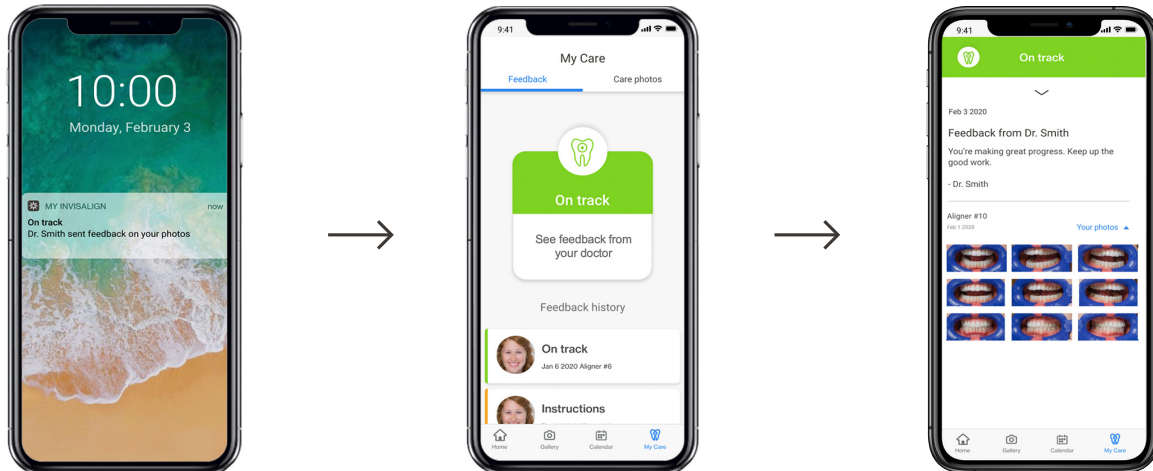

+ Instructions

Votre docteur pourrait fournir des directives supplémentaires, par exemple vous demander de porter vos aligneurs actuels plus longtemps ou d'utiliser des rouleaux siliconés (chewies). Suivez toujours les directives de votre docteur pour garder votre nouveau sourire sur la bonne voie.

De temps en temps, il se peut que votre docteur ait à modifier votre traitement, par exemple, le stade de traitement des aligneurs ou sa durée. Il est possible de programmer ces changements automatiquement dans votre application My Invisalign. Touchez simplement l'écran d'acceptation de la mise à jour des paramètres et vous continuerez à recevoir des notifications concernant votre nouveau programme de changement des aligneurs.

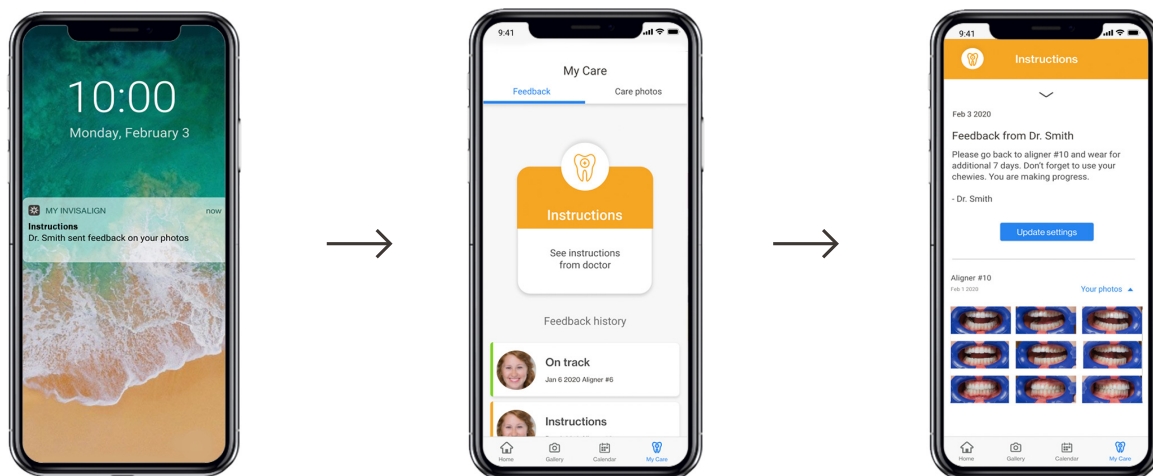

Votre docteur pourrait vous demander de fixer un rendez-vous virtuel avec lui. Le cas échéant, vous recevrez un courriel avec un lien pour télécharger l'application de réunion « Zoom Meetings » et un lien pour joindre la réunion au moment prévu.

N'oubliez pas d'explorer l'application My Invisalign.



Essayez l'indicateur de durée pour effectuer le suivi du port de vos aligneurs et garder votre docteur au courant.



Utilisez l'outil de suivi des rendez-vous pour assurer le suivi des prochains rendez-vous.



Voyez et partagez vos photos de progression avec votre famille et vos amis.



Obtenez de l'aide sur l'application sous l'onglet « My Feedback/rating ». Utilisez le formulaire pour envoyer des questions.